



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 3323

FOTOGRAFIA



DETALLES

Mediana compresión 15-20mmHg.

INDICACIONES

- Terapéutica.
- Venas reticulares.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Pesadez.
- Post escleroterapia.

BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Talón verdadero para mayor comodidad.
- Banda elástica para ajuste perfecto.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.

CONTRAINDICACIONES

- Oclusión arterial aguda.
 - Lesiones de la piel y ulceración activa.
- Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

COMPOSICIÓN

Composición: 89% Poliamida, 10% Hilo caucho, <1% Elastano

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Negro, Azul, Café y Gris.
Tallas: S, M, L y XL



Nombre: Calcetín Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 3323

CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

CÓDIGOS

Item	Nombre	Código EAN-13
3323p0104	Calcetin Com. Media 15-20 S Negro	7707670408992
3323p0105	Calcetin Com. Media 15-20 S Azul	7707670405687
3323p0107	Calcetin Com. Media 15-20 S Cafe	7707670404482
3323p0112	Calcetin Com. Media 15-20 S Gris	7707670402501
3323p0204	Calcetin Com. Media 15-20 M Negro	7707670408954
3323p0205	Calcetin Com. Media 15-20 M Azul	7707670404963
3323p0207	Calcetin Com. Media 15-20 M Cafe	7707670400361
3323p0212	Calcetin Com. Media 15-20 M Gris	7707670405526
3323p0304	Calcetin Com. Media 15-20 L Negro	7707670408664
3323p0305	Calcetin Com. Media 15-20 L Azul	7707670405342
3323p0307	Calcetin Com. Media 15-20 L Cafe	7707670405380
3323p0312	Calcetin Com. Media 15-20 L Gris	7707670401030
3323p0404	Calcetin Com. Media 15-20 XL Negro	7707670407544
3323p0405	Calcetin Com. Media 15-20 XL Azul	7707670400323
3323p0407	Calcetin Com. Media 15-20 XL Cafe	7707670406394
3323p0412	Calcetin Com. Media 15-20 XL Gris	7707670402921



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003

Fecha Creación: Octubre 23 de 2019

Versión: 01

Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 3323

MATERIAL EMPAQUE

Medi Varic®

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN

Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Recuéstate y eleva las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamiento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Products SAS
www.medivaric.com.co
Línea Nacional de Atención: 01 4 30 30 30 - Bogotá, D.C., Colombia
R.S. INVIMA 2011DM-000794



1. Deslice la media desdoblada uniformemente desde el tobillo hasta el muslo, acomodándola cuidadosamente, sin arrastrar demasiado.
2. Desdoble la media por la parte superior y deslice la media hacia el muslo.
3. Coloque la media hacia el muslo, desdoblándola cuidadosamente, sin arrastrar demasiado.
4. Deslice la media hacia el muslo, desdoblándola cuidadosamente, sin arrastrar demasiado.
5. Verifique que pulgada, talón, planta y dedos queden en su lugar.



ALMA PARA MEDIA DE RODILLA
BOLSA INTERNA ALTPACK

CAJA INDIVIDUAL

PESO CAJA IND.	
S	0,087 gr
M	0,093 gr
L	0,099 gr
XL	0,105 gr

MEDIDA CAJA IND.		
A	Altura 1	15,5
B	Altura 2	15
C	Ancho	9,5
D	Profundidad	2,8
E	Lomo	2,8

STICKER





FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 3323

MATERIAL EMPAQUE

CAJA SIX PACK PEQUEÑA

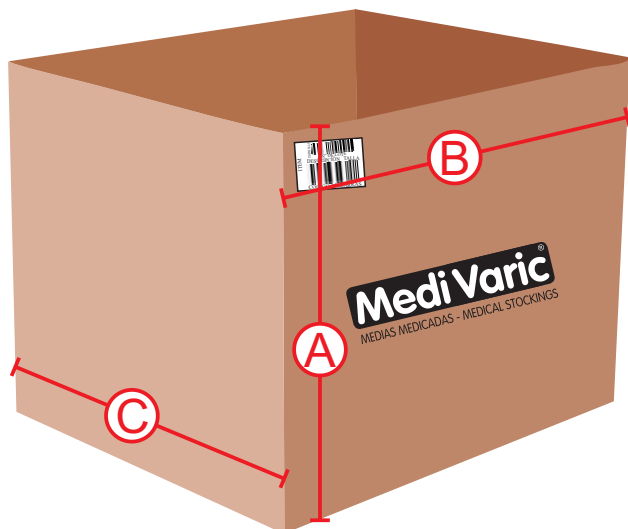

MEDIDA CAJA SIX PACK


A	Altura	18
B	Ancho	16
C	Profundidad	10

PESO CAJA SIX PACK

S	0,565	gr
M	0,601	gr
L	0,637	Kl
XL	0,664	Kl

CANTIDAD 6 UNIDADES

CAJA MASTER

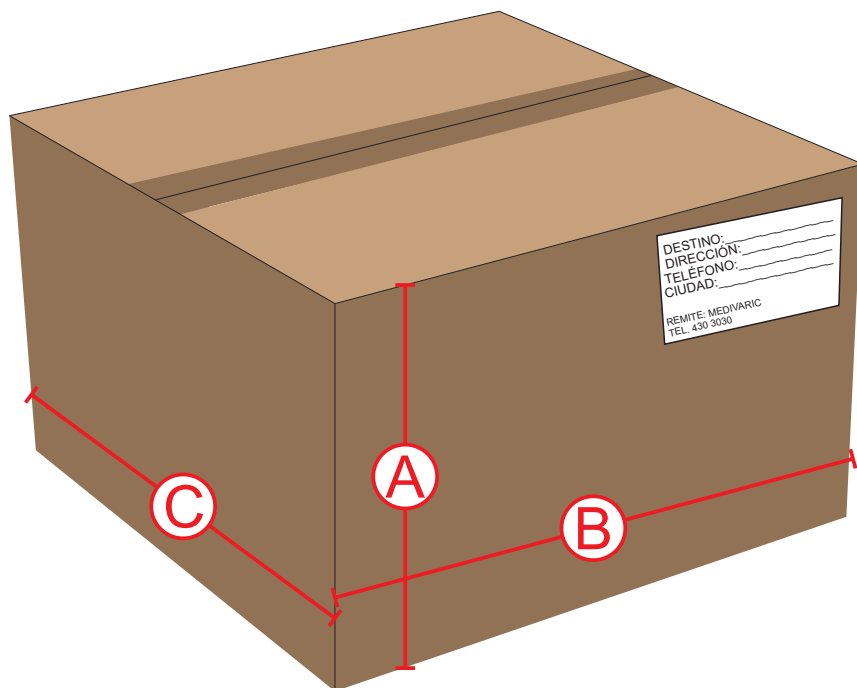

MEDIDA CAJA MASTER

A	Altura	42
B	Ancho	55
C	Profundidad	40

PESO CAJA MASTER

S	13,56	Kl
M	14,42	Kl
L	15,29	Kl
XL	15,94	Kl

CANTIDAD 144 UNIDADES