



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 02 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Muslo Antiembólica Compresión 18-23 mmHg

Ref: 4462

FOTOGRAFIA



DETALLES

Antiembólica compresión 18-23 mmHg.

INDICACIONES

- Trombosis venos profunda, prevención del T.E.P edema.
- Varico trombosis.
- Paciente quirúrgico de mediano y alto riesgo.
- Paciente cirugía de rodilla y cadera.

BENEFICIOS

- Compresión descendente uniforme de 18-23 mmHg a nivel del tobillo.
- Abertura de inspección.
- Talón verdadero para mayor comodidad.
- Costuras planas que no marcan la piel.
- Banda siliconada para mejor ajuste.

CONTRAINDICACIONES

- Reciente injerto de piel.
- Infecciones en la piel.
- Gangrena.
- Dermatitis.

Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

COMPOSICIÓN

Composición: 80% Poliamida 20% Elastano



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 02 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Muslo Antiembólica Compresión 18-23 mmHg

Ref: 4462

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Blanco

Tallas: S, M, L y XL

CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda e insumos.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

CÓDIGOS NOVASOFT

Item	Nombre	Código EAN-13
4462p0102	Unisex Muslo Antiembolica S Blanco	7707670403201
4462p0202	Unisex Muslo Antiembolica M Blanco	7707670409968
4462p0302	Unisex Muslo Antiembolica L Blanco	7707670405229
4462p0402	Unisex Muslo Antiembolica XL Blanco	7707670409739



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 02 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Muslo Antiembólica Compresión 18-23 mmHg

Ref: 4462

MATERIAL EMPAQUE

Medi Varic®
MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

INDICACIONES PARA LA FORMULACIÓN
Consulte a su médico

COMPRESIÓN VENOSA INDICADA	REF	SÍNTOMAS
18-23 mm Hg ANTIEMBÓLICA	PROFUNDIDAD	Várico tromboflebitis, Trombosis Venosa Profunda, prevención de TEE post quirúrgicos de mediano y alto riesgo, paciente de cirugía ortopédica de cadera y rodilla. Varicose vein thrombosis, deep vein thrombosis, pulmonary thromboembolism prevention, post surgical medium-and-high risk orthopedic surgery patients hip and knee.

CONTRAINDICACIONES: Injerto de piel Reciente, Infecciones en la piel, Gangrena, Dermatitis, Deformidad extrema de la pierna, Arteriosclerosis severa, Ulceración activa, Isquemia vascular

CONTRAINDICATIONS: Recent skin graft, Infections of the skin, gangrene, dermatitis, severe arteriosclerosis, extreme deformity of the leg, active ulceration, vascular ischemia.

ultrafresh
PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL
ANTIBACTERIAL PROTECTION

SAG
COMPRESIÓN CERTIFICADA
CERTIFIED COMPRESSION

Como colocar / How to put on:
1. Voltee la media al revés.
Turn stocking inside out.
2. Con la media al revés haga coincidir el orificio de inspección con la parte superior de los dedos de pie y el talón de la media con el talón del pie.
With stocking inside out, match the inspection hole with the tip of toes and the stocking heel with that of your foot.
3. Deslice la media de forma ascendente evitando que se le caiga.
Put stocking upwards avoiding rolling it up.
4. Para media hasta la rodilla y hasta el muslo, asegure la media en la cadera convenientemente.
At knee height, adjust the elastic comfortably. At knee height, adjust the elastic comfortably.
5. Para media hasta la cadera, asegure la media en la cadera convenientemente.
At knee height, adjust the elastic comfortably.

Antes de colocarla / Before putting on:
Haga un calentamiento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el talón hasta el muslo.
(Realice este ejercicio tres veces).
Make a venous emptying by pressing evenly with both hands from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).

Como colocar / How to put on:
1. Voltee la media al revés.
Turn stocking inside out.
2. Con la media al revés haga coincidir el orificio de inspección con la parte superior de los dedos de pie y el talón de la media con el talón del pie.
With stocking inside out, match the inspection hole with the tip of toes and the stocking heel with that of your foot.
3. Deslice la media de forma ascendente evitando que se le caiga.
Put stocking upwards avoiding rolling it up.
4. Para media hasta la rodilla y hasta el muslo, asegure la media en la cadera convenientemente.
At knee height, adjust the elastic comfortably. At knee height, adjust the elastic comfortably.
5. Para media hasta la cadera, asegure la media en la cadera convenientemente.
At knee height, adjust the elastic comfortably.



ALMA PARA MEDIA DE CADERA
BOLSA INTERNA ALTAPACK

CAJA INDIVIDUAL

PESO CAJA IND.	
S	0,108 gr
M	0,112 gr
L	0,116 gr
XL	0,120 gr

MEDIDA CAJA IND.		
A	Altura 1	19,5
B	Altura 2	19
C	Ancho	11,5
D	Profundidad	2,8
E	Lomo	2,8

STICKER





FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 02 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Muslo Antiembólica Compresión 18-23 mmHg

Ref: 4462

MATERIAL EMPAQUE

CAJA SIX PACK GRANDE

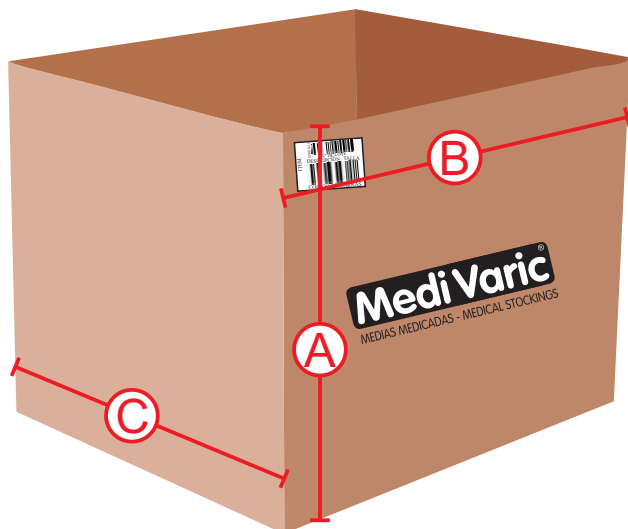

MEDIDA CAJA SIX PACK


A	Altura	19,5
B	Ancho	20
C	Profundidad	11,5

PESO CAJA SIX PACK

S	0,688	gr
M	0,711	gr
L	0,735	Kl
XL	0,759	KL

CANTIDAD 6 UNIDADES

CAJA MASTER

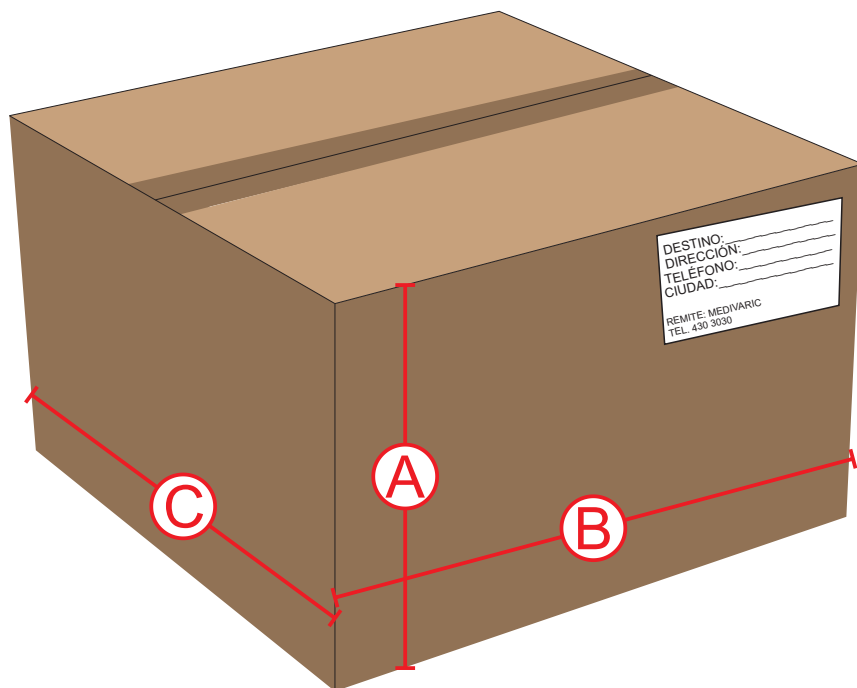

MEDIDA CAJA MASTER

A	Altura	42
B	Ancho	55
C	Profundidad	40

PESO CAJA MASTER

S	12,38	Kl
M	12,79	Kl
L	13,23	Kl
XL	13,66	KL

CANTIDAD 108 UNIDADES