



**TORNIQUETE STRETCH®
BD VACUTAINER®**

**Becton Dickinson de
Colombia Ltda.**

**Sistemas Integrados de
Diagnóstico - IDS**

Versión: 2021-1



DESCRIPCIÓN Y USO PREVISTO DEL PRODUCTO:

Banda elástica con broche de seguridad que permite la fijación de la vena en pacientes a los cuales se les practicará extracción Sanguínea

- Previene los pellizcos o rozaduras de la piel al apretar o aflojar
- Libre de látex para evitar reacciones alérgicas en los pacientes
- Diseño amigable que lo hace fácil de usar (con una sola mano)

CERTIFICADO NO REQUIERE INVIMA:

Número: 2010016224

Fecha Emisión: Julio 21 de 2010

Titular: Becton Dickinson de Colombia Ltda.

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUETADO

CATALOGO	PRODUCTO	DIMENSIONES	PRESENTACIÓN
367218	Torniquete Pronto	40 cms x 3.0 cms	Caja X 6 unidades

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Almacenamiento	4 a 35°C - No exponer a la luz directa del sol
Certificación – Estándares	ISO 13485, MD19.2137

USO PREVISTO

El torniquete Pronto™ BD Vacutainer® se utiliza para la fijación de la vena con el fin de facilitar la localización para el procedimiento de extracción sanguínea, es simple, fácil de usar y está diseñado pensando en la seguridad del trabajador de la salud y del paciente.

El torniquete debe ser aplicado solamente cuando se requiere. Se coloca aproximadamente de 6 a 10 cm por encima del sitio de la venopunción.

El tiempo de aplicación no debe exceder de un minuto.

Es aconsejable que el torniquete se retire apenas empiece a fluir sangre dentro del primer tubo.

El uso excesivo del torniquete puede llevar a un aumento en varios analitos, como la proteína total, albumina, potasio, creatinina y ácido láctico, disminución de glucosa, cambios en la eritrosedimentación y las pruebas de estallido respiratorio de leucocitos.



Becton Dickinson de Colombia Ltda.

NIT 860020309-6

Parque Industrial CLIS. Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia. Vía Cota

Cota- Cundinamarca

Fax Gerencia: (571) 5723650

Fax Servicio al Cliente: (571) 5724250 - 5732908

Apartado Aéreo: 57680

Cota – Cundinamarca.

Tel: (571) 7566060

www.bd.com