

1.- Descripción corta: Ultra-Fine™ Aguja 4mm 32G 5B UTW 100pz.

2.- Descripción larga: Aguja para dispositivo de inyección tipo pluma (lapicero) Ultra-Fine™ 4mm x 32G con 5 biselos y Pared Ultradelgada (UTW). En caja con 100 piezas.

3.- Código interno: 320489.




Cubierta externa



Cubierta interna



Aguja para pluma

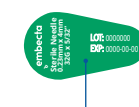

Etiqueta despegable de color

Empaque Secundario



Contenido: Caja con 100 agujas.
Largo (cm): 12.8
Ancho (cm): 7
Alto (cm): 8.3
Peso Bruto (kg): 0.15
EAN 13 | GTIN 13: 0383017048938




Empaque Colectivo



Contenido: 12 cajas
Cotenido: 1,200 agujas
Camas por corrugado: 2
Largo (cm): 43.5
Ancho (cm): 13.5
Alto (cm): 17.5
Peso Bruto (kg): 2
DUN 14 | GTIN 14: 50383017048957



Información de tarima:

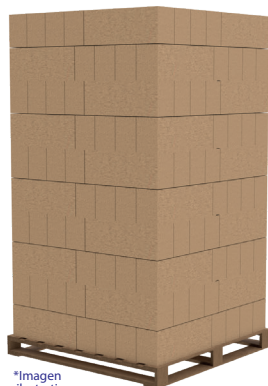

*Imagen ilustrativa

Cajas por cama:	18
Camas por pallet:	9
Cajas colectivas por pallet:	162
Número de agujas por pallet:	194,400
Altura del pallet sin tarima de madera (cm)	174
Altura del pallet con tarima de madera (cm)	187
Largo del Pallet (cm)	120
Ancho del Pallet (cm)	100
Peso por pallet sin tarima (kg)	302
Peso por pallet con tarima (kg)	315

4.- Información Adicional

Componentes del dispositivo	Material
Cánula:	Acero inoxidable 304 (Grado quirúrgico)
Gauge de la aguja:	32G
Largo de la aguja (pulgadas):	5/32"
Largo de la aguja (milímetros):	4mm
Ingeniería de la punta de la aguja:	Cinco biseles
Pared de la aguja:	Ultradelgada (UTW)
Libre de látex:	Sí
Lubricante de la cánula:	Silicona catalizada (Extremo del paciente) Silicona no catalizada (Extremo no paciente)
Adhesivo de cánula:	Adhesivo de curado ultravioleta
Casquillo:	Polipropileno
Cobertura de la aguja (cubierta interna):	Polietileno + Concentrado de color
Tapa (cubierta externa):	Polietileno o polipropileno
Barrera de esterilidad (etiqueta desplegable de color):	Papel/Papel de copolímero

5.- Seguridad: La etiqueta desplegable y las cubiertas internas y externas de la aguja garantizan la esterilidad. La rosca en el cono externo proporciona una adaptación y fijación segura al lapicero (pluma).

6.- Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los dispositivos tipo lapiceros (pluma) del mercado.

7.- Condiciones de almacenamiento

- Temperatura ambiente.
- Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

8.- Vida útil: Revisar lote y fecha de caducidad en empaque.

9.- Instrucciones de uso:

- Retire la etiqueta desplegable de color del producto.
- Conecte la aguja, enroscando su base del lapicero (pluma) de la aplicación de insulina.
- Registre la dosis conforme a la prescripción médica.
- Retire la cubierta externa, cubierta interna, el protector interno y aplique en forma subcutánea.

** Cada lapicero (pluma) posee características propias, lea el respectivo manual antes del uso.

10.- Precauciones y advertencias:

- Quite la aguja del lapicero (pluma) después de cada aplicación para prevenir la entrada de aire y la salida de insulina.
- Jamás realice una aplicación por encima de la ropa.
- Deseche la aguja en un recipiente con paredes rígidas que no se quiebre.
- Ciérrelo e identifíquelo como material contaminado.
- Utilice sólo si el lacre adhesivo de la aguja y de la caja estuvieren intactos.
- La esterilidad del trayecto del fluido está garantizada siempre y cuando el envase de la aguja no esté abierto o dañado.

Registro sanitario: INVIMA 2018DM-0017818

Código GMDN (Global Medical Device Nomenclature): 44127

Clasificación de riesgo: IIA
CONSULTE A SU MÉDICO

Ficha técnica 320489 Aguja para dispositivo de inyección tipo pluma (lapicero) Ultra-Fine™ Caja con 100 piezas.
embecta y su logotipo son marcas comerciales de embecta Corp. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2026 embecta Corp. Todos los derechos reservados.