



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código	ODS-F14
Versión	C
Fecha	5/9/2018

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	Rodillera rótula abierta			VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES	
REFERENCIA INTERNA:	18633NM / 18635NM / 18637NM / 186387NM / 18639NM			B	B	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Descripción y tipo de producto	Soporte de rodilla diseñada para prevenir y tratar esguinces leves de la rodilla.					
FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO: 	COMPOSICIÓN	DESCRIPCIÓN				
		68 % Neopreno		28 % Poliéster		4% Otros
	INSUMOS	Hilaza			Hilo poliester	
		Neopreno			Marquilla talla	
		Malla deportiva			Etiqueta	
		Marquilla transfer			Código de barras	
		Sesgo elástico			Bolsa impresa	
	TALLAS	S-M-L-XL-XXL				
	COLOR/ES	Negro				
	Material	Tamaño: Ancho X Alto		Tintas / Calibre	Terminados	Color
ETIQUETADO:	Adhesivo	14 cm	23 cm	4 tintas	Plastificado	Policromia
EMPAQUE:	PET CON ZIPPER	16 cm 20 cm	31 cm 39 cm	NO APLICA	NO APLICA	Transparente

STIKER CODIGO DE BARRAS: En la información del stiker va textual lo que lleva impreso.	Papel Adhesivo	10 cm	3.5 cm	INFORMACIÓN STIKER: REFERENCIA / TALLA / LOTE	
CARACTERÍSTICAS: De materiales y diseño de producto	1. Fabricado en materiales que permiten mayor transpiración. 2. Orificio patelar que centraliza la rótula y alivia la presión rotuliana sobre el fémur. 3. Aumenta la compresión y brinda mayor soporte a la zona a tratar. 4. Brinda calor, soporte preventivo y terapéutico.				
USOS: Beneficios del producto en la persona	1. Desgarros musculares. 2. Esguinces de rodilla grado 1 y 2. 3. Lesiones deportivas. 4. Tendinitis patelar.				
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: Precauciones durante el uso, recomendaciones y posibles efectos secundarios.	1. Irritación o sensibilidad en la piel (enrojecimiento, urticaria, inflamación). 2. Inflamaciones severas que hagan sospechar síndrome compartimental. 3. Respuestas alérgicas al material. 4. Aumento desproporcionado en el dolor. 5. Se debe tener precaución en el uso a largo plazo ya que pueden disminuir el trofismo de la musculatura.				
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:	Lavar a mano con agua fría y jabón suave. No usar detergente. No lavar en lavadora.				
No. REGISTRO SANITARIO: Número de registro Invima, si aplica.	2018 DM-0003215-R1		CERTIFICADO DE ORIGEN: Si aplica o No		SI
INSTRUCCIONES DE USO: Paso a paso de postura del producto.	1. Introduzca el pie en la rodillera y ubíquela en la mitad de la rodilla 2. Ubique el orificio en el centro de la rodilla				

OBSERVACIONES:	Esta ficha técnica tiene la composición porcentual actualizada.
FECHA DE MODIFICACIÓN: De ficha Técnica	13 De Enero del 2019.