

SUR-FIT® Natura® Durahesive®

Barrera Flexible Recortable

DESCRIPCIÓN

Las barreras cutáneas Durahesive están diseñadas para personas cuyas descargas de estoma es mayormente líquida. A diferencia de otras barreras que pueden desintegrarse al contacto con estomas líquidos, las barreras Durahesive® se expanden para proteger el estoma. Este efecto especial al que llamamos cuello de tortuga, ayuda a crear un sello mucho más seguro sin lastimar la piel. Adicionalmente, las barreras Durahesive® son fáciles de acoplar, aplicar y retirar y se mantendrán adheridas de forma segura a la piel en la piel al ducharse o nadar.



Componentes

- La barrera adhesiva está compuesta de una pestaña ultrasónicamente adherida al centro de la masa adhesiva a un disco Durahesive que permite el paso del estoma.
- Un collar no tejido cuadrado se adhiere entre los bordes exteriores de la pestaña y el disco adhesivo Durahesive.
- El adhesivo de la barrera es una masa Durahesive compuesta de gelatina, carboximetilcelulosa de sodio, pectina, poli-isobutileno, caucho de butilo, caucho de estireno-isopropeno-estireno, tetrakis, ester pentaeritritol de una rosina, aceite mineral.
- La masa Durahesive está laminada con polietileno labrado y el collar es de poliéster no tejido que puede ser blanco o de un tono beige a bronceado

Uso previsto

- Para el manejo de las descargas del estoma

Características

- **Adhesión:** Las barreras Durahesive se mantienen firmemente adheridas a la piel mientras la protegen de las descargas irritantes; mantendrán su adhesión a la piel en actividades con una mayor exposición al agua como la ducha y la natación.
- **Protección de la piel:** El efecto de cuello de tortuga, ayuda a que la barrera se ajuste de forma personalizada a cada estoma reduciendo la incidencia de fugas sin lesionar la piel.
- **Adaptación:** Los sistemas recortables permiten que la barrera se adapte a diferentes tamaños y formas de estoma.
- **Flexibilidad:** Las barreras flexibles se adaptan a los diferentes tipos de abdomen.

Instrucciones de uso

Se recomienda consultar el instructivo de uso de las barreras que es suministrado al interior del empaque, antes de la aplicación del mismo.

Preparación de la piel

- Antes de la aplicación, sus manos y la piel que rodea al estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas.

Preparación del protector de la piel

- Marque el contorno del estoma por las líneas del protector anti adhesivo del protector de la piel.
- Corte el protector de la piel por fuera del trazo marcado, dejando al menos $\frac{1}{4}$ " (0,6 cm) del protector de la piel entre el borde del corte y el borde del protector.
- Alise la abertura del corte con sus dedos.

Aplicación del protector de la piel

- Retire el protector anti adhesivo del protector de la piel.
- Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma.
- Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel periestomal durante 30 segundos.
- En el caso de que haya algún borde de tela, retire el sobrante del protector anti adhesivo, alíselo y elimine las arrugas.
- Use el producto mientras le resulte cómodo y lo sienta seguro. El tiempo de uso puede variar.

Remoción

- Sostenga la piel con una mano y suavemente retire la barrera cutánea de la piel. Deseche la barrera

SUR-FIT® Natura® Durahesive®

Barrera Flexible Recortable

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: 2025DM-0012578-R1 Ecuador: 2518-DME-0517 Perú: N/A	5 años	Almacenar a temperatura ambiente (10°C – 25°C / 50°F – 77°F). Mantener en lugar seco.

Empaque Primario Material de empaque: Papel/PVC				
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Alto]	Peso (g)
413164	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 32MM	768455126408	15 x 1 x 15	27,7
413165	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 38MM	768455126415		
413166	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 45MM	768455126422		
413167	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 57MM	768455126439		
413168	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 70MM	768455126446		

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario Material de empaque: Caja plegadiza de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
413164	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 32MM	768455106240	12,7 x 88,9 x 12,7	317,8	10
413165	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 38MM	768455106257			
413166	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 45MM	768455106264			
413167	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 57MM	768455106271			
413168	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 70MM	768455106288			

Empaque Terciario Material de empaque: Caja corrugada de cartón					
REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
413164	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 32MM	10768455106247	14,1 x 26,8 x 45,8	3,4	10
413165	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 38MM	10768455106254			
413166	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 45MM	10768455106261			
413167	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 57MM	10768455106278			
413168	DURAHESIVE WFR FLEX TAN 70MM	10768455106285			

SUR-FIT® Natura® Durahesive® Barrera Flexible Recortable



Fabricantes:

ConvaTec Limited - Reino Unido
Convatec Dominican Republic – República Dominicana

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com