

**DESCRIPCIÓN**

Toallitas para limpiar adhesivos médicos sin irritaciones  
ESENTA™

**COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO**

Hexamethyldisiloxane  
Octamethyldisiloxane

**FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO**

ConvaTec Limited – Reino Unido  
HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido  
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido

**INSTRUCCIONES DE USO**

- Desgarre el sobre para abrirlo y despliegue la toallita
- Frote la toallita sobre los residuos de adhesivo para quitarlos

**CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO**

- Se seca en unos segundos.
- Crea una superficie limpia sin afectar la adhesión del próximo material o apósito.
- Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

**PRECAUCIONES**

Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección y contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto. Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas, y la legislación y los reglamentos locales.

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Solo para uso externo

**ADVERTENCIAS**

Muy Inflamable

**USOS**

Eliminación de residuos de adhesivo de la piel

**VIDA ÚTIL**

4 años

**ESTERILIDAD**

Producto no estéril

**REGISTRO SANITARIO**

INVIMA 2021DM-0024336  
VIGENCIA: 1 de octubre  
de 2031

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Protéjase contra la exposición externa, como altas temperaturas.  
Radiación UV / luz solar.

**PRESENTACIONES**

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
423391	Esenta Sting Free Adhesiva Remover wipes caja x 25 sachets	
423281	Esenta Sting Free Adhesiva Remover wipes caja x 30 sachets	