

DESCRIPCIÓN

Vaporizador para el protector cutáneo sin irritaciones ESENTA™ (50 ml)

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

94,75% Hexamethyldisiloxane, HMDSO
5% Trimethylated Silica, TMS (Trimethylsiloxysilicate)
0,25% Zanthalene®



FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO

ConvaTec Limited – Reino Unido
HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie y seque la piel.
2. Sostenga el producto a unos 10 cm del área que se va a tratar.
3. Aplique un recubrimiento uniforme en un movimiento de barrido.
4. Asegúrese de que el área esté completamente seca antes de aplicar productos adhesivos, como equipos o apósitos.
5. El producto debe sustituirse en cada cambio de apósito o material para mantener una protección completa.

USOS

Protección de la piel frente a los daños asociados a los desechos corporales, enzimas y adhesivos.

CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO

- Normalmente, no es necesario quitarlo. No obstante, el protector cutáneo ESENTA™ se puede quitar fácilmente con el limpiador de adhesivos médicos ESENTA™.
- El vaporizador puede aplicarse en cualquier ángulo.
- Alivia la piel enrojecida y dolorida.
- Reduce el picor.
- Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

PRECAUCIÓN:

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Evite la inhalación.
- Solo para uso externo.

ADVERTENCIAS:

- Usar solo según las indicaciones.
- Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

MUY INFLAMABLE

VIDA ÚTIL	ESTERILIDAD	REGISTRO SANITARIO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
4 años	Producto no estéril	INVIMA 2021DM-0024229 VIGENCIA: 13 de septiembre de 2031	<ul style="list-style-type: none"> • No fumar. • No perforar ni quemar, incluso después de su uso. • Proteger de la luz solar. • No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

PRESENTACIONES

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
423288	Esenta Sting Free Skin Barrier Spray 50ml	1 spray