




# FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Media Fantasy Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1723

## FOTOGRAFIA

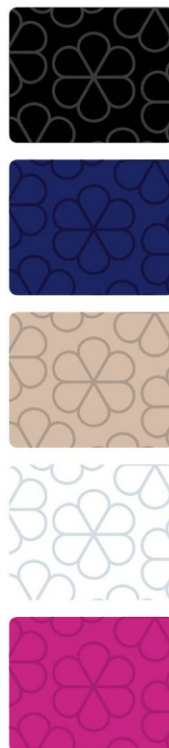

## DETALLES

Diseño en tejido mediana compresión 15-20mmHg.

## INDICACIONES

- Terapéutica.
- Venas reticulares.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Pesadez.
- Post escleroterapia.

## BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Talón verdadero para mayor comodidad.
- Banda elástica de ajuste perfecto.

## RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.

## CONTRAINDICACIONES

- Oclusión arterial aguda.
  - Lesiones de la piel y ulceración activa.
- Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

## COMPOSICIÓN

Composición: 89% Poliamida, 10% Hilo caucho, <1% Elastano

## DATOS ESPECÍFICOS

Color: Blanco, Negro, Azul, Fucsia y Natural.  
Tallas: S, M, L y XL



# FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Media Fantasy Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1723

## CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

## RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

## CÓDIGOS

| Item      | Nombre        |             |            | Código EAN-13 |
|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 1723p0102 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Blanco S   | 7707670409234 |
| 1723p0104 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Negro S    | 7707670407988 |
| 1723p0105 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Azul S     | 7707670402129 |
| 1723p0115 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Fucsia S   | 7707670406998 |
| 1723p0142 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Natural S  | 7707670405717 |
| 1723p0202 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Blanco M   | 7707670406585 |
| 1723p0204 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Negro M    | 7707670409654 |
| 1723p0205 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Azul M     | 7707670402198 |
| 1723p0215 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Fucsia M   | 7707670400347 |
| 1723p0242 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Natural M  | 7707670400736 |
| 1723p0302 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Blanco L   | 7707670401610 |
| 1723p0304 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Negro L    | 7707670408299 |
| 1723p0305 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Azul L     | 7707670406011 |
| 1723p0315 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Fucsia L   | 7707670406318 |
| 1723p0342 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Natural L  | 7707670405397 |
| 1723p0402 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Blanco XL  | 7707670404949 |
| 1723p0404 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Negro XL   | 7707670402785 |
| 1723p0405 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Azul XL    | 7707670408756 |
| 1723p0415 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Fucsia XL  | 7707670405915 |
| 1723p0442 | Media Fantasy | 15-20 mm Hg | Natural XL | 7707670400583 |



# FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Media Fantasy Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1723

## MATERIAL EMPAQUE

**Medi Varic®**

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN  
Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Recuéstese y eleve las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Products SAS  
www.medivaric.com.co  
Línea Nacional de Atención: 01 4 50 30 30 - Bogotá, D.C., Colombia  
R.S. INVIMA 2011DM-0007944



- Como colocar / How to put on:**
1. Deslice la media desmenuzándose uniformemente desde el tobillo hasta el muslo, acomodándose convenientemente, sin ejercer demasiada fuerza.
  2. Introdúzcase la punta de los dedos y deslice la media hacia el talón de la pierna, con los dedos pulgares sobre la parte de la pierna, con los dedos índices sobre la parte de la pierna, con los dedos medios sobre la parte de la pierna, con los dedos anulares sobre la parte de la pierna, con los dedos meñiques sobre la parte de la pierna.
  3. Coloque la media hacia el talón de la pierna, con los dedos pulgares sobre la parte de la pierna, con los dedos índices sobre la parte de la pierna, con los dedos medios sobre la parte de la pierna, con los dedos anulares sobre la parte de la pierna, con los dedos meñiques sobre la parte de la pierna.
  4. Deslice la media hacia abajo el talón de la pierna, con los dedos pulgares sobre la parte de la pierna, con los dedos índices sobre la parte de la pierna, con los dedos medios sobre la parte de la pierna, con los dedos anulares sobre la parte de la pierna, con los dedos meñiques sobre la parte de la pierna.
  5. Verifique que la media, talón, planta y talón queden en su lugar. Check toe, heel and sole in place.



ALMA PARA MEDIA DE RODILLA  
BOLSA INTERNA ALTAPACK

CAJA INDIVIDUAL

| PESO CAJA IND. |          |
|----------------|----------|
| S              | 0,074 gr |
| M              | 0,077 gr |
| L              | 0,080 gr |
| XL             | 0,083 gr |

| MEDIDA CAJA IND. |             |      |
|------------------|-------------|------|
| A                | Altura 1    | 15,5 |
| B                | Altura 2    | 15   |
| C                | Ancho       | 9,5  |
| D                | Profundidad | 2,8  |
| E                | Lomo        | 2,8  |

STICKER





# FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Media Fantasy Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1723

## MATERIAL EMPAQUE

### CAJA SIX PACK PEQUEÑA

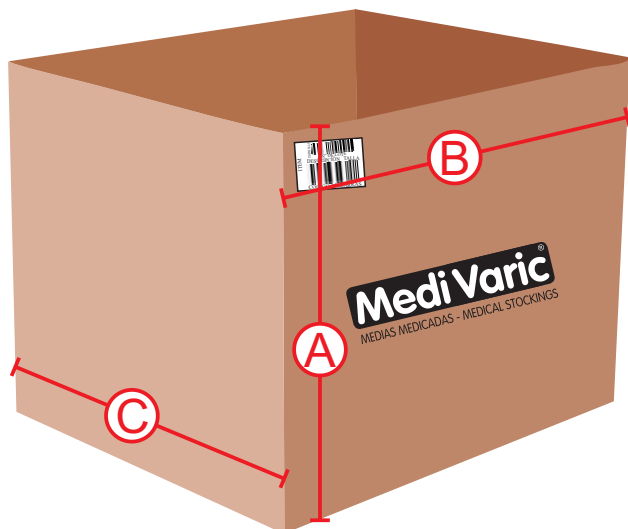

#### MEDIDA CAJA SIX PACK


|   |             |    |
|---|-------------|----|
| A | Altura      | 18 |
| B | Ancho       | 16 |
| C | Profundidad | 10 |

#### PESO CAJA SIX PACK

|    |       |    |
|----|-------|----|
| S  | 0,480 | gr |
| M  | 0,498 | gr |
| L  | 0,516 | Kl |
| XL | 0,534 | Kl |

CANTIDAD 6 UNIDADES

### CAJA MASTER

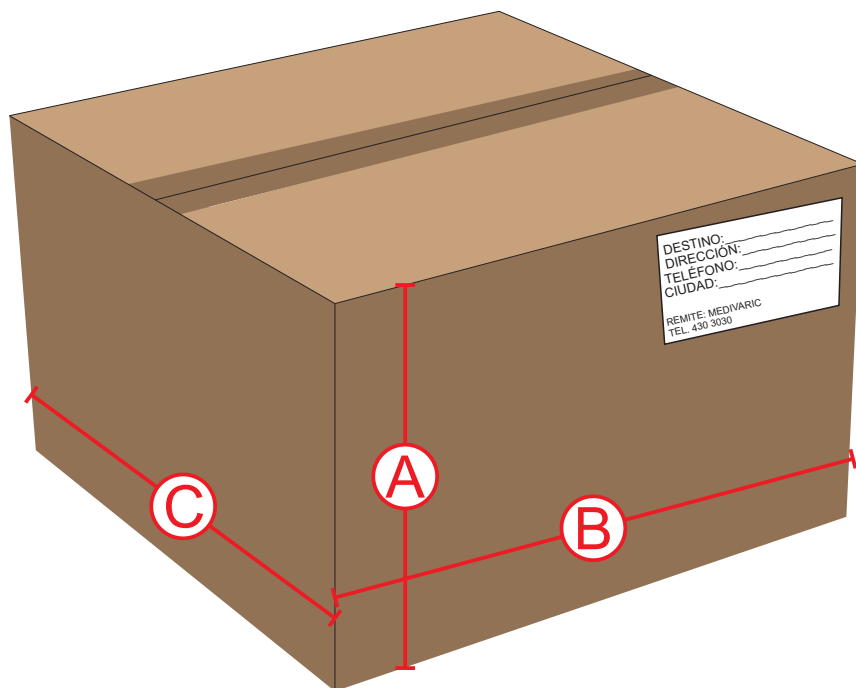

#### MEDIDA CAJA MASTER

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| A | Altura      | 42 |
| B | Ancho       | 55 |
| C | Profundidad | 40 |

#### PESO CAJA MASTER

|    |       |    |
|----|-------|----|
| S  | 11,52 | Kl |
| M  | 11,95 | Kl |
| L  | 12,38 | Kl |
| XL | 12,82 | Kl |

CANTIDAD 144 UNIDADES