

	FICHA TÉCNICA GLUTACIDES PLUS+	Código GC-FT-13
		Versión 05
		Página 1 de 4

Partida Arancelaria	3808.94.19.00
----------------------------	---------------

ENSAYO	ESPECIFICACIONES	
	SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO	SOLUCIÓN ACTIVADORA
ASPECTO	Líquido homogéneo traslúcido, libre de partículas extrañas	Solución homogénea traslúcida, libre de partículas extrañas
COLOR	Incoloro	Azul claro
OLOR	Característico a limón	Característico a limón
pH GLUTACIDES INACTIVADO	3,6 - 4,6	
pH GLUTACIDES ACTIVADO	3,7 – 4,7	
DENSIDAD (g/mL)	1,0009 – 1,0919	
COLOR DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA	Azul	
MATERIAL PARTICULADO	Ausencia	
CONTENIDO DE GLUTARALDEHÍDO	2,0% - 2,35%	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
DESCRIPCIÓN Y USO	Desinfectante de alto nivel a base de Glutaraldehído al 2 %, para instrumentos quirúrgicos, médicos y dentales. Rápida y eficiente acción biocida contra hongos, virus y bacterias. Modo de empleo: Agregar la solución activadora al envase y agitar. Anotar en el espacio señalado en la etiqueta, la fecha de expiración (45 días después de activado). Lavar muy bien el instrumental a desinfectar o esterilizar y adicionar la cantidad requerida de GLUTACIDES PLUS+ en la cubeta, de tal forma que lo cubra totalmente. Dejar mínimo 10 minutos dentro de la solución activada si se va a desinfectar. Enjuagar luego con agua potable. Para esterilizar, dejar mínimo 10 horas. Enjuagar luego con agua destilada o con agua que haya sido sometida a ebullición por 10 minutos.

	• La mezcla se mantiene durante 45 días activada siempre y cuando no haya sido utilizada previamente. Descartarse si presenta residuos. • La mezcla activada y en contacto con el instrumental se debe de mantener tapada para evitar su contaminación y exposición con el aire. No utilizar la mezcla que ha estado en contacto con material contaminado por más de 2 días consecutivos. Si es posible cambiarla diariamente de acuerdo a la carga del material a desinfectar y esterilizar. • Reusable, si se verifica previamente la concentración con tirillas indicadoras. * Mantener la mezcla activada cubierta para evitar su contaminación. • El material a sumergir debe encontrarse totalmente limpio, las trazas de desinfectante y/o jabón causan polimerización del producto, generando un aspecto opaco del mismo. • No dejar por un tiempo mayor del requerido el instrumental dentro de la solución, especialmente objetos de acero al carbono.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando, para preservar las características propias del producto. Una vez abierto el envase, utilizar en el menor tiempo posible. • Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. • Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. • Manténgase fuera del alcance de los niños. • Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de

	FICHA TÉCNICA GLUTACIDES PLUS+	Código GC-FT-13
		Versión 05
		Página 3 de 4

	ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar agua o cualquier otro ingrediente que altere la composición del producto.
DISPOSICIÓN FINAL	• GLUTACIDES PLUS+ es biodegradable. Comprobado mediante prueba OECD (301A). • Para eliminar saldos del producto, después de su uso: Por cada mL de GLUTACIDES PLUS+, adicione 50 mL de agua, enjuague bien el envase vacío y dispóngalo como material reciclable. • Después de 45 días de activado, se inactiva el producto.
PRECAUCIONES	• Use elementos de protección personal para su manipulación; en caso de tener contacto, enjuague con abundante agua. • No lo ingiera y evite el contacto con alimentos. • GLUTACIDES PLUS+ no está recomendado para aspersión, debido a su toxicidad para las vías respiratorias. • Evitar la inhalación prolongada de sus vapores en áreas cerradas.
PRESENTACIÓN COMERCIAL	375 mL 1 L Galón (3,8L)
REGISTRO SANITARIO	2022DM-0025752, vence 25/07/2032
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años
EAN 13 PRESENTACIÓN 375 mL	7702314240365
EAN 13 PRESENTACIÓN 1000 mL	7702314240372
EAN 13 PRESENTACIÓN 3800 mL (3,8 L)	7702314240358

PRESENTACIONES COMERCIALES

	FICHA TÉCNICA GLUTACIDES PLUS+		Código GC-FT-13
			Versión 05
			Página 4 de 4

3800 mL



1000 mL



375 mL

