

	FICHA TÉCNICA COMERCIAL						Código	ODS-F14	
							Versión	D	
							Fecha	27-may-19	
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:		GUANTE TÚNEL CARPIANO					VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES	
REFERENCIA INTERNA:		402000NL DERECHO 402010NL IZQUIERDO					A	A	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		Guante recubierto con gel polímero en la parte interior para evitar fricción y roce, reduce el riesgo de cicatriz queloide o hipertrófica. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios de túnel carpiano.							
CARACTERÍSTICAS:		Guante de lycra, contiene en su interior un pad en gel en forma de ocho con aceite mineral 100% grado médico. Talla Universal derecho e izquierdo, 8 mm de espesor. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel, reutilizable.							
USOS:		Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. Post-operatorio de síndrome de Túnel Carpiano.							
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:		En caso de irritación consultar inmediatamente con el especialista. Producto no estéril, no usar sobre heridas abiertas. No adicionar cremas u otros productos que afecten las propiedades de Gelkam. Ninguno de los consejos o recomendaciones anteriores sustituye el consejo médico. Mantener alejado del alcance de los niños.							
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:		Lavar diariamente el guante con jabón líquido suave y secar a temperatura ambiente. Guardar el guante dentro del empaque original con su respectivo acetato. Conservar en un lugar fresco.							
INSTRUCCIONES DE USO:		Introduzca la mano ubicando la almohadilla del gel en la palma para mayor confort y mejor recuperación. Ubique cada dedo en el orificio correspondiente, cuidando que el dedo medio y anular vayan en el mismo espacio central. Asegúrese que los dedos queden ubicados cómodamente y sin ningún tipo de presión.							
COMPOSICIÓN		Gel polímero (Bht USP, aceite mineral USP, Polímero (SEBS))							
INSUMOS		Caja		Hilaza		Acetato			
		Sticker para picking		Hilo		Fécula de maíz			
		Sticker para Código de barras							
COLOR / ES		Beige							
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO		Caja x Unidad Universal Derecho Caja x Unidad Universal Izquierdo							
TABLA DE MEDIDAS		TALLA	Contorno Superior	Contorno Inferior	Largo	Ancho	Alto	Radio	Otras
		402000NL DERECHO	22 cm	21 cm	21 cm	10 cm	N.A	N.A	N.A
		402010NL IZQUIERDO	22 cm	21 cm	21 cm	10 cm	N.A	N.A	N.A
EMPAQUE:		Material		Tamaño		Peso	Calibre	Información que brinda	
		CAJA		22 x 13,5 cm				Nombre del producto, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y Advertencias, Cuidados, Talla, Fabricado, Cantidad, Composición, Dirección de Fabricación.	
		STICKER PICKING		3 cm x 2.8 cm		1,2gr	N.A	Referencia, Lote.	
		STICKER CÓDIGO DE BARRAS		3 cm x 2.8 cm		1,2gr	N.A	Referencia, lote, código de barras.	
No. REGISTRO SANITARIO:		INVIMA 2021DM-0024510			OBSERVACIONES:		N.A		
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:		21/9/2021							