

FICHA TÉCNICA

Bota Walker No Articuladas Corta para Tobillo

& Larga Tipo Cam



Conservación y Garantía:

- Estimado cliente. Lea las instrucciones de colocación que se entregan con el producto.
- El importador | distribuidor garantiza este producto por treinta (30) días, siempre que no haya sido alterado en su configuración original.
- No se garantiza el producto que por mal uso, produzca deficiencia o ruptura de cualquier tipo.

Datos Técnicos:

Invima: 2018DM-0018804

Vence: 05-11-2028

Mod: Botas para Tobillo

Tipo de Dispositivo: No invasivo

Riesgo: (I)

Empaque: Bolsa plástica x Ud

Vida Útil: N/A

País de Origen: China

Certificaciones del fabricante: ISO13485

IMPORTADOR Y ACONDICIONADOR

Ortotex S.A.S

Tel (57) (604) 557 97 01

Inf: ortotex@ortotex.com.co

Medellín | antioquia | Colombia

Cómo funciona:

- Montante ranurado acanalado de poliuretano duradero permite un fleje más seguro, estabiliza e inmoviliza pantorrilla, pie, tobillo hasta la rodilla.
- Diseño acolchado transpirable y suave para un uso cómodo
- Suela antideslizante en forma de balancín de bajo perfil , acelerando el proceso curativo y previniendo la atrofia muscular
- Fácil de colocar y ajustar mediante correas circunferenciales.
- Diseño anatómico para pie izquierdo o pie derecho

Efectos:

- Inmovilización de la articulación tibio-tarsiana incluyendo el pie, tobillo y pantorrilla.
- Disminución de la carga en el segmento lesionado.
- Suela antideslizante en forma de balancín de bajo perfil que permite seguridad en la marcha, previniendo la atrofia muscular.
- Acelera el trabajo de rehabilitación y el proceso curativo

Instrucciones de Uso:

- Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica es importante la elección de la talla correcta
- Se aconseja regular la compresión hasta un grado firme, una compresión excesiva produce intolerancia en el paciente

Instrucciones de Mantenimiento:

- Lavar EL BOTÍN Y LAS ALMOHADILLAS DE ESPUMA a mano con jabón neutro y agua tibia hasta 30°C
- Lavar con los velcros adheridos al botín para evitar la acumulación de pelusas.
- No retorcer, utilice una tohalla seca para absorber la mayor cantidad de humedad secar a temperatura ambiente
- No planchar, no exponga al sol, ni secadoras. Secar a temperatura ambiente
- Para evitar el deterioro de la carcasa no utilice en la limpieza sustancias abrasivas, alcohólicas, pomadas o líquidos disolventes.

Advertencia:

- Si el botín no está bien enjuagado los residuos del detergente pueden irritar la piel
- Estar atento a los puntos de presión, zonas rojas o erupciones que puedan afectar la piel. Si tiene algún tipo de molestia o lesión, consulte a su médico o profesional de la salud.



Medida del pie	Talla	Talla de calzado	Longitud. Ref: FT-010	Longitud. Ref: FT-019
22-24cm	S	34-36	28cm	43cm
25-27cm	M	37-39	28cm	43cm
28-30cm	L	40-42	28cm	43cm