

DESCRIPCIÓN

Las bolsas ActiveLife® son dispositivos no invasivos diseñados para recoger la salida de un estoma (ileostomía y colostomía). Las bolsas de una pieza se adhieren directamente a la piel a través de su barrera cutánea integral de Stomahesive. Las bolsas drenables tienen su extremo abierto para el drenaje fecal.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Barrera Stomahesive: carboximetilcelulosa de Sodio, Gelatina, Pectina, Poliisobutileno.

Bolsa y collar adhesivo: escudo protector de la barrera (película PVC), etiqueta con guía de corte, película Five Ply, material de respaldo (LDPE con 9% Vinil Acetato), laminado película de Polietileno, papel de liberación en Silicona, soporte en Polietileno no tejido con acrílico adhesivo.



FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO

Convatec Dominican Republic INC - República Dominicana
Convatec Limited – Reino Unido

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA BOLSA

La piel alrededor del estoma debe estar limpia, seca y libre de disolventes o sustancias grasosas.

En el caso de bolsas con abertura de estoma precortada:

Seleccione una bolsa con una abertura de estoma precortada que sea al menos 1/8 de pulgada (3 mm) más grande que el diámetro mayor del estoma.

NO agrande la abertura de estoma precortada.

Retire el protector de material plástico del disco Stomahesive®.

Para bolsas cortadas a la medida:

Mida el estoma usando la guía adjunta.

Retire el protector de material plástico del disco Stomahesive®.

Antes de cortar, separe los paneles frontal y trasero.

Usando las guías en el papel de soporte, corte el orificio central al mismo tamaño que el estoma. No corte más allá de la última línea.

APLICACIÓN DE LA BOLSA

Retire el papel de soporte (ver imágenes en Instrucciones de Uso). Verifique que la adaptación alrededor del estoma esté bien ceñida.

USO DEL CIERRE DE COLA

RETIRO DE LA BOLSA

Este producto no necesita quitarse durante el baño, la ducha o la natación, Seque dando palmaditas después de exponerlas al agua.

DISPOSICIÓN

Se debe cumplir con los requisitos o reglamentaciones locales para disposición de residuos.

CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO

- Contiene el efluente sin fugas
- Discretos, con poco ruido y olor
- Fácil de vaciar y el cierre de la cola es fácil de limpiar
- No provocan reacciones cutáneas y protegen la piel periestomal
- Fácil de poner y quitar, bolsa cómoda
- Mantiene la adherencia a la piel durante el tiempo requerido
- La película transparente permite al usuario evaluar el volumen, el tipo de salida y permite la visualización del estoma. La película transparente es ideal para el uso institucional, ya que permite visualizar tanto el efluente como el estado del estoma.

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN: Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía al ras, especialmente cuando se asocia con megauréteres y ausencia de un depósito urinario. En raras ocasiones, los informes clínicos han documentado la presencia del agente adhesivo en la sistema de recolección renal de estos pacientes. En caso de descubrirse una masa en el tracto urinario, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e iniciar el tratamiento clínico apropiado.

USOS

Para el manejo de las descargas del estoma.

ESTERILIDAD	REGISTRO SANITARIO	VIDA ÚTIL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Producto no estéril	INVIMA 2022DM-0025371 VIGENCIA: 09-jun-2032	5 años	Almacenar a temperatura entre 10°C - 30°C/50°F - 86°F. Mantener en lugar seco.

PRESENTACIONES

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
22771	ACTIVE LIFE PCH STD CLR CUST	Caja x 10