

DESCRIPCIÓN

Pinza o cierres de cola Recta que aseguran el final abierto de las bolsas drenables para ostomías

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Polipropileno.



FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO

Fabricante Legal: ConvaTec Limited – Reino Unido
Fabricante Real: ConvaTec Dominican Republic, Inc – República Dominicana

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Si se utiliza el aro para cinturón, éste deberá insertarse antes de colocar la pinza.

1. Si se considera conveniente, la pinza puede colocarse antes de conectar la bolsa. Coloque el extremo inferior de la bolsa sobre la barra angosta de la pinza, en la forma ilustrada.
2. Oprima firmemente la barra superior hasta escuchar como embona y cierra con seguridad, en la forma ilustrada.
3. Con ambas manos, separe el reborde de la barra, en la forma ilustrada.

CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO

Seguridad: El cierre hermético de la pinza proporciona un ajuste seguro.

Click audible: Permite saber que se ha realizado el ajuste perfecto.

Resistencia: La pinza esta elaborada en un plástico resistente al peso de la bolsa y a la manipulación frecuente. Una pinza resiste el uso de 10 bolsas.

USOS

Asegurar el final abierto de las bolsas drenables para ostomías

ESTERILIDAD	REGISTRO SANITARIO	VIDA ÚTIL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Producto no estéril	INVIMA 2020DM-0022713 VIGENCIA: 23-Dic-2030	5 años	Almacenar a temperatura entre 10°C - 30°C/50°F - 86°F. Mantener en lugar seco.

PRESENTACIONES

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
175635	SUR-FIT/ACTIVE LIFE TAIL CLSR	Caja x 10