

FLEXI-DRESS™

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA

DESCRIPCIÓN

La venda elástica FLEXIDRESS™ está diseñada para el tratamiento ambulatorio de las úlceras vasculares venosas y del edema linfático. Consiste en un gasa extensible que contiene pasta de óxido de zinc no endurecido (óxido de zinc, acacia, glicerina, aceite de ricino, y vaselina).

FLEXI-DRESS™ se adapta al contorno de la pierna, se extiende fácilmente y se mantiene flexible.



Características

Flexi-Dress™ Bota Unna Elástica está destinado a ser utilizado como apósito de retención primaria de un solo uso en el que la gasa elástica está impregnada con una pasta de óxido de zinc no endurecible que deja una película protectora en la superficie de la piel. Está diseñado para ser una barrera eficaz alrededor de la úlcera venosa de la pierna que es susceptible de dañarse por el exudado de la herida crónica, que tras su aplicación, puede cubrirse con un vendaje de compresión secundario adecuado.

Componentes

Gasa elástica hecha de poliéster y fibras de algodón, Pasta de Oxido de Zinc no endurecido 26.7%.

Composición de la pasta: glicerina 26.69 %, oxido de zinc 26.69%, Petrolato blanco, USP 18.82%, Agua Potable 16.54%, Acacia USP 6.32%, Aceite de Ricino 4.94%.

Uso previsto

Tratamiento ambulatorio de úlceras vasculares venosas y edemas linfáticos.

Instrucciones de Uso

Limpieza de la lesión

Limpiar la lesión de acuerdo con la práctica habitual, o con suero fisiológico, secar la piel periulceral antes de aplicar el vendaje.

APLICACIÓN DE LA VENDA ELÁSTICA ADHESIVA FLEXI-DRESS™

1. Iniciar el vendaje con FLEXIDRESS™ desde la punta del pie. Mantener el pie y el tobillo en el ángulo correcto durante la aplicación. FLEXI-DRESS™ debe envolver la pierna de forma suave evitando dejar huecos y pliegues.
2. Aplicar una capa de vendaje a toda la pierna para que la cubra hasta la rodilla. FLEXIDRESS™ se adapta al contorno de la pierna.
3. Aplicar un vendaje elástico compresivo. Mantener siempre la presión y cubrir completamente FLEXI-DRESS™.

CAMBIO DE LA VENDA ELÁSTICA ADHESIVA FLEXI-DRESS™

Levante el extremo libre del vendaje y desenrolle la venda de la pierna con cuidado; no es necesario cortar FLEXI-DRESS™ para cambiarlo.

Precauciones

El uso inicial de este producto debe realizarse bajo la dirección de un profesional sanitario. Si aparece enrojecimiento o irritación de la piel, se debe discontinuar la utilización de producto y consultar con un profesional sanitario. FLEXI-DRESS™ proporciona un tratamiento local de la insuficiencia vascular; la falta del adecuado reposo, así como el no mantener elevado el miembro afectado en pacientes con insuficiencia vascular puede aumentar el edema local y dificultar el posible proceso de cicatrización. Si aparecen signos de infección clínica, tales como olor no característico o cambio en el color del exudado, fiebre o celulitis (sensibilidad y eritema en la zona de la lesión), se debe realizar un cultivo del lecho de la lesión. En presencia de signos de infección, se debe iniciar el adecuado tratamiento médico.

FLEXI-DRESS™

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2020DM-0021491 Ecuador: 1948-DME-0616 Perú: DM7143E	2 años	Almacene a temperatura ambiente (10°C - 25°C)

Empaque Primario

Material de empaque: Bolsa de Polietileno

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Diámetro x Alto]	Peso (g)
650940	FLEXI-DRESS BNDG 3"X10YD 7.6 cm x 914,4 cm	N/A	5 x 11,7	157
650941	FLEXI-DRESS BNDG 4"X10YD 10,2 cm x 914,4 cm			

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario

Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
650940	FLEXI-DRESS BNDG 3"X10YD 7.6 cm x 914,4 cm	768455033034	5,1 x 5,1 x 11,8	176,7	1
650941	FLEXI-DRESS BNDG 4"X10YD 10,2 cm x 914,4 cm	768455033041			

Empaque Terciario

Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
650940	FLEXI-DRESS BNDG 3"X10YD 7.6 cm x 914,4 cm	10768455033031	22 x 17 x 14	2,3	12
650941	FLEXI-DRESS BNDG 4"X10YD 10,2 cm x 914,4 cm	10768455033048			



Fabricantes:

ConvaTec Inc – Estados Unidos
ConvaTec Limited – Reino Unido



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile ConvaTec