

## DESCRIPCIÓN

La bolsa drenable y personalizable ConvaTec LITTLE ONES™ es una bolsa de una pieza con una barrera cutánea adhesiva.

## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

### Barrera masa adhesiva:

Carboximetilcelulosa de Sodio, Gelatina, Pectina, Poliisobutileno LMMH, Poliisobutileno (L100).

### Componentes de la bolsa y el collar:

papel de liberación en Silicona, película en relieve de Polietileno, película Five Ply.



FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO

ConvaTec Dominican Republic INC - República Dominicana

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. Mida el estoma con la guía proporcionada. Limpie suavemente el área con agua y séquela suavemente, sin frotar. La piel periestomal DEBE estar libre de disolventes o sustancias grasosas.
2. Trace el tamalo del estoma en el papel blanco posterior, centrándose alrededor del orificio inicial.
3. **IMPORTANTE:** Antes de cortar, separe los paneles frontal y dorsal para no cortar el panel frontal de la bolsa.
4. Usando tijeras curvas, agrande el orificio central hasta un tamaño levemente mayor que el trazado. **NO** corte más allá del círculo en el papel desprendible.

### COLOCACIÓN DE LA PINZA DE CERRADO

- (a) Importante que la pinza de cerrado se aplique tal como se describe para evitar pérdidas.
  - (b) Coloque la pinza de cerrado antes de colocar la bolsa en el cuerpo.
5. Retire el papel desprendible de la tira adhesiva de la pinza de cerrado. Coloque el dispositivo aproximadamente a 0,6 cm (1/4") del extremo de la pinza de la bolsa, en el lado de la bolsa son la barrera cutánea. Presione en su lugar.
  6. Doble firmemente la pinza de la bolsa hacia arriba 4 VECES como se muestra.
  7. Doble firmemente los extremos de la pinza de cerrado como se muestra, hacia el lado de la bolsa con la barrera cutánea, asegurándose que la pinza quede lisa, plana y sin arrugas.

### COLOCACIÓN DE LA BOLSA

**IMPORTANTE:** Se debe tener cuidado de ejercer sólo una presión suave sobre el abdomen del lactante cuando se coloque cualquier sistema de bolsas.

8. Retire el papel desprendible de la barrera cutánea evitando lo más posible el contacto del dedo con el adhesivo. **NOTA:** Cuando se use la pasta Stomahesive®, se recomienda aplicarla como un anillo alrededor del orificio agrandado en el lado adhesivo de la barrera cutánea.
9. Sostenga los dos lados de la barrera cutánea y coloque el orificio agrandado sobre el estoma.
10. Presione suavemente la barrera contra la piel, prestando atención especial al área más cercana al estoma.

La bolsa puede usarse mientras sea cómoda y no haya señales de irritación.

### REMOCIÓN DE LA BOLSA

11. La remoción se puede realizar desde arriba hacia abajo, tirando suavemente de la barrera cutánea para separarla de la piel, mientras se aplica una presión ligera con la mano libre sobre la piel adyacente. No es necesario quitar todo el residuo.

## CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES DEL PRODUCTO

1. Cualidades protectoras de la piel similares a las ofrecidas por la barrera cutánea Stomahesive®, pero modificadas para no dañar la piel.
2. Un orificio inicial que puede agrandarse para aceptar estomas de cualquier tamaño y forma de hasta 50 mm (2") de diámetro.
3. Un panel posterior similar a una tela, para mayor comodidad.
4. Una película de barrera contra el olor suave y discreta.
5. Una pinza de cierre suave y moldeable diseñada para uso pediátrico.

## PRECAUCIONES

Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía plana, especialmente cuando se asocia a megauréteres y ausencia de un depósito urinario. En raros casos, se han documentado estudios clínicos sobre la presencia del adhesivo en el sistema de recolección renal de estos pacientes. Si se descubre una masa en las vías urinarias, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e instituir las medidas clínicas apropiadas.

**USOS**

Esta bolsa es específicamente diseñada para uso pediátrico.

VIDA ÚTIL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	ESTERILIDAD	REGISTRO SANITARIO
5 años	Mantener a temperaturas entre 10°C y 30°C. Proteger de la humedad.	Producto no estéril	2012DM-0000973-R1 VIGENCIA: 23 abril de 2022

**PRESENTACIONES**

ICC	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN (UND/CAJA)
020922	Little Ones una pieza 8 - 50mm	15