

		FICHA TÉCNICA COMERCIAL				Código	ODS-F14		
						Versión	E		
						Fecha	9-may-22		
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:		CABESTRILLO SENCILLO				VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES		
REFERENCIA INTERNA:		D1541 / D1465				D	D		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		Órtesis para el soporte del antebrazo, fabricada en material transpirable , reata con tensor Que permite la regulación de la longitud del tirante adecuándolo a la necesidades de cada paciente, que protege de incomodas presiones sobre cuello y hombro.							
CARACTERÍSTICAS:		1 Material transpirable 2 Diseño anatómico 3 Reata ajustable que facilita la postura y retiro del mismo 4 Protector de cuello acolchado que brinda mayor comodidad en la zona del cuello							
USOS:		Soporte indicado para fracturas, esguinces y lesiones de hombro y codo.							
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:		1 Irritación o sensibilidad en la piel (enrojecimiento , urticaria) 2 Respuestas alérgicas al material 3 Ampollas en la piel 4Psoriasis ,flictenas, Dermatitis , celulitis 5 Aumento desproporcionado del dolor							
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:		Lavar a mano con agua fría y jabón suave .No usar detergente . No lavar en lavadora							
INSTRUCCIONES DE USO:		1. Cruce la reata por detrás del cuello. 2. Introduzca el brazo en la funda 3. Gradúe la reata hasta llegar a 90 grados para tener la posición correcta del brazo 4. Ubique el acolchado en el cuello para brindar mayor comodidad							
COMPOSICIÓN		Poliéster 84%		Nylon 11%		Otros 5%			
INSUMOS		Malla deportiva		Hilo poliéster		Cuadrante			
		Reata		Sesgo		Marquilla transfer			
		Hilaza		Marquilla papel		Codigo de barras			
		Felpa de 1"		Gancho de 1"		Picking			
		Hiladillo		Bolsa		Etiqueta			
COLOR / ES		Negro							
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO		Unidad							
TABLA DE MEDIDAS		TALLA	Contorno Superior	Contorno Inferior	Largo	Ancho	Alto	Radio	Otras
		PEDIATRICO	N.A	N.A	25 CM	12 CM	N/A	N/A	Largo Correa de ajuste: 60cm-87 cm (+/- 1cm) PESO TOTAL PRODUCTO KM2000N: 95.1G
		INFANTIL	N.A	N.A	32 CM	14 CM	N/A	N/A	
EMPAQUE:		Material		Tamaño		Peso	Calibre	Información que brinda	
		CAJA		18 CM ALTO X 12 CM ANCHO X 5 CM DE PROFUNDIDAD		12.0 g	90gr	N.A	
							18		
		ETIQUETA		N/A		N/A	N/A	Nombre del producto, Descripción, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y Advertencias, Cuidados, Color, Talla, Fabricado, Cantidad, Composición, Marca, Registro Sanitario, Dirección, Página web.	
		STICKER PIKING		3CM ALTO X 3.5CM ANCHO		0.2 g	N/A	Referencia, Lote.	
		STICKER CODIGO DE BARRAS		3CM ALTO X 3.5CM ANCHO		0,2gr	N/A	Referencia del producto, Requisición, Orden de producción, Año.	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:		TEMPERATURA= (MAX: 30°C) + 2° C HUMEDAD RELATIVA = (MAX: 75%) + 5% A TENER EN CUENTA: 1. Evitar almacenar en ambientes cálidos" definiendo cálido a temperatura mayores entre 32° y 40 °C. 2. No deben retirarse los dispositivos medicos de su empaque primario, deben conservarse simpre en su empaque original. 3. No deben exponerse los productos al sol 4. El rótulo de cada producto deberá establecerse en el empaque primario. 5. Los dispositivos deben estar en Estado de limpieza, orden y aseo en paredes, pisos y techos de las áreas donde se realicen actividades de almacenamiento. 6. Disponer de equipos contra incendios en área de fácil acceso. 7. Realizar Limpieza y desinfección de las instalaciones y superficies de trabajo, control de roedores e insectos, para evitar la contaminación. SE DEBE CUMPLIR CON: • Cumplir con el Uso de los elementos de protección personal (EPP), Sujeta a la matriz legal vigente • Especificamente con los EPP para manipulación de cargas (Faja lumbar o arnés, Guantes de maniobra, Botas punta de acero, a su vez el personal no debe portar elementos colgantes (Tipo collares, corbatas, pulseras, relojes de pulso, anillos, aretes), Utilización de cofia para el cabello. • Garantizar en el almacenaje que los planos móviles del tendido de la cama estén debidamente asegurados. • La manipulación del producto (traslado, carga y arrume) debe realizarse entre dos personas para compensar carga, se debe maniobrar por el chasis principal rígido no por los planos, la cama debe manipularse Verticalmente plano cabeza hacia abajo, plano pies hacia arriba (Frontales respectivamente hacia arriba, hacia abajo, laterales hacia izquierda, hacia derecha)Se debe calcular la capacidad y resistencia, Tener en cuenta la resistencia estabilidad y facilidad de manipulación de embalaje. Se debe cubrir proteger el material cuando este lo requiera.							
No. REGISTRO SANITARIO:		INVIMA 2015DM-0013020		OBSERVACIONES:		"Se actualiza partida arancelaria 9021101000"			
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:		7/12/2022							