

		FICHA TÉCNICA COMERCIAL				Código	ODS-F14
						Versión	E
						Fecha	9-may-22

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:		COLLAR THOMAS				VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES		
REFERENCIA INTERNA:		KM000/ KM001/ KM002 VI-KM000/ VI-KM001/ VI-KM002 OLKM000/ OLKM001/ OLKM002							
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Descripción y tipo de producto		Collar para la buena alineación de la columna cervical con leve limitación de los arcos de movimiento de la misma.							
CARACTERÍSTICAS: De materiales y diseño de producto		Diseño anatómico en espuma de baja densidad. Forro de algodón con repuesto intercambiable.							
USOS: Beneficios del producto en la persona		1. Esguinces agudos de la columna cervical. 2. Síndrome de fatigazo.							
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: Precauciones, advertencias, contraindicaciones y posibles efectos secundarios		La inmovilización no requerida expone al paciente a complicaciones, como el aumento de la presión intracranial y dificultad una vía aérea permeable, aumenta el riesgo de aspiración, disfagia, ulceraciones en la piel, dolor, isquemia tisular. Advertencia: • La movilización inadecuada del cuello puede provocar lesiones espinales. • La aplicación de una talla pequeña del collar puede permitir la flexión cervical. • La aplicación de una talla grande puede llevar a una extensión cervical. • Cierre excesivo del collar: incomodidad, dificultad respiratoria, dificultad para la deglución. • Inadecuado cierre del collar: desprendimiento del collarín y pérdida brusca de inmovilidad.							
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:		Lavado de Forro: Retire el protector del collar, lávelo a mano con agua fría y jabón suave. No usar detergente. No lavar en lavadora. No lavar el collar.							
INSTRUCCIONES DE USO: Paso a paso de postura del producto		1. Ubicar alrededor del cuello. 2. Pegar velcro en la parte lateral y ajustar según comodidad del paciente.							
COMPOSICIÓN		41 % Poliester		25% Poliol		25% Isocianato		Algodón 9%	
INSUMOS		Felpa Hilo Poliester Estoqueleta Código de Barras		Marguilla Isocianato 150 Gancho Poliol G-049		Bolsa Etiqueta Transfer Aceite mineral			
COLOR / ES		Blanco							
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO		UNIDAD							
TABLA DE MEDIDAS		TALLA	Contorno Cuello o Superior	Contorno Inferior	Largo	Ancho	Alto	Radio	Otras
		KM002 / Pediátrico	30 cm - 44 cm	N.A	42cm	2.5cm	7.5cm	N.A	
		KM000 / Infantil	51 cm - 60 cm	N.A	50cm	2.5cm	8.5cm	N.A	
		KM001 / Universal	45 cm - 52 cm	N.A	50cm	2.5cm	9cm	N.A	
		S				29 cm	22 cm		
		M				33 cm	22 cm		
		L				35 cm	22 cm		
EMPAQUE:		Material		Tamaño		Peso	Calibre	Información que brinda	
		BOLSA		39 CM ALTO X 20 CM ANCHO		16.8gr	90gr	N.A	
		ETIQUETA		29 CM ALTO X 16 CM ANCHO		5,2gr	N/A	Nombre del producto, Descripción, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y Advertencias, Cuidados, Color, Talla, Fabricado, Cantidad, Composición, Marca, Registro Sanitario, Dirección, Página web.	
		STICKER PARA PIKING		3 CM ALTO X 3.5 CM ANCHO		0,2gr	N/A	Referencia, Lote.	
		STICKER CODIGO DE BARRAS		3 CM ALTO X 3.5 CM ANCHO		0,2gr	N/A	Referencia del producto, Requisición, Orden de producción, Año.	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Variables como temperatura, humedad e iluminación para la buena disposición del producto y preservación del mismo		TEMPERATURA= (MAX: 30°C) + 2° C HUMEDAD RELATIVA = (MAX: 75%) + 5% A TENER EN CUENTA: 1. Evitar almacenar en ambientes cálidos* definiendo cálido a temperatura mayores entre 32° y 40 °C. 2. No deben retirarse los dispositivos medicos de su empaque primario, deben conservarse siempre en su empaque original. 3. No deben exponerse los productos al sol 4. El rótulo de cada producto deberá establecerse en el empaque primario. 5. Los dispositivos deben estar en Estado de limpieza, orden y aseo en paredes, pisos y techos de las áreas donde se realicen actividades de almacenamiento. 6. Disponer de equipos contra incendios en área de fácil acceso. 7. Realizar Limpieza y desinfección de las instalaciones y superficies de trabajo, control de roedores e insectos, para evitar la contaminación. SE DEBE CUMPLIR CON: • Cumplir con el Uso de los elementos de protección personal (EPP). Sujeta a la matriz legal vigente • Específicamente con los EPP para manipulación de cargas (Faja lumbar o arnés, Guantes de manobra, Bolas punta de acero, a su vez el personal no debe portar elementos colgantes (Tipo collares, corbatas, pulseras, relojes de pulso, anillos, aretes). Utilización de cofia para el cabello. • Garantizar en el almacenaje que los planos móviles del tendido de la cama estén debidamente asegurados. • La manipulación del producto (traslado, carga y arreme) debe realizarse entre dos personas para compensar carga, se debe manipular por el chasis principal rígido no por los planos, la cama debe manipularse Verticalmente plano cabeza hacia abajo, plano pies hacia arriba (Frontales respectivamente hacia arriba, hacia abajo, laterales hacia izquierda, hacia derecha)Se debe calcular la capacidad y resistencia, Tener en cuenta la resistencia estabilidad y facilidad de manipulación de embalaje. Se debe cubrir proteger el material cuando este lo requiera.							
No. REGISTRO SANITARIO: Nombre del registro sanitario, si aplica		INVIMA 2017DM-0016209			OBSERVACIONES:		Se actualiza partida arancelaria 9021101000		
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: De ficha Técnica		27/12/2022							