

	FICHA TÉCNICA COMERCIAL					Código	ODS-F14		
						Versión	E		
						Fecha	9-may-22		
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:		FAJA DORSO LUMBAR			VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES			
REFERENCIA INTERNA:		D1466 / D1467 / D1468 / D1469 / D1576			B	B			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Descripción y tipo de producto		Ayuda a limitar parcialmente los movimientos de la columna dorsal lumbar. Diseño anatómico que brinda apoyo y soporte en la espalda y la protege de desgarres musculares, dorsolumbalgias y escoliosis. Mantiene soporte abdominal con sus elásticos de doble cierre.							
CARACTERÍSTICAS: De materiales y diseño de producto		1. Fabricado en tejido de algodón suave y resistente. 2. Diseño anatómico que brinda soporte y estabilidad en el posterior. 3. Mantiene soporte abdominal con sus elásticos de doble cierre.							
USOS: Beneficios del producto en la persona		Elemento de protección, apoyo y soporte en todos aquellos casos desgarras musculares, dorso lumbalgias y escoliosis.							
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: Precauciones durante el uso, recomendaciones y posibles efectos secundarios		Usar una prenda de algodón debajo de la Ortesis para prevenir laceraciones en la piel.							
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:		Lavar a mano con agua fría y jabón suave. No usar detergente. Secar sobre una superficie plana. No lavar en lavadora.							
INSTRUCCIONES DE USO: Paso a paso de postura del producto		Ubique tiras en los hombros. Situé la faja. Ubique elásticos rodeando la cintura y fije velcros según su comodidad. Cruce las tiras en la parte de atrás, páselas hacia adelante y asegúrese con los velcros.							
COMPOSICIÓN		Poliéster 60 %		Nylon 15 %	Polipropileno 14 %	Elastómero 8 %	Otros 3 %		
INSUMOS		Cremallera	Hilo poliéster		Slider	Sesgo abierto blanco			
		Plástico	Reata Multi 1"		Ojalate	Bondeado			
		Felpa 1"	Sesgo abierto Azul		Felpa 2"	Código de barras			
		Gancho 1"	Marquilla talla		Gancho 2"				
		Elastico	Etiqueta		Hilaza				
		Malla poliéster	Marquillas						
COLOR / ES		BLANCO							
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO									
TABLA DE MEDIDAS		TALLA	Contorno Cintura	Contorno talco	Largo	Ancho	Alto	Radio	Otras
		S	N.A	N.A	47 cm (+/-) 1 cm	78 cm (+/-) 1 cm82 cm	N.A	N.A	Largo de correa: 82 cm (+/-) 1 cm PESO TOTAL PRODUCTO KM103: 381G
		M	N.A	N.A	47 cm (+/-) 1 cm	84 cm (+/-) 1 cm87 cm	N.A	N.A	Largo de correa: 118 cm (+/-) 1 cm PESO TOTAL PRODUCTO M KM105: 388.1G
		L	N.A	N.A	47 cm (+/-) 1 cm	87 cm (+/-) 1 cm91 cm	N.A	N.A	Largo de correa: 122cm (+/-) 1 cm PESO TOTAL PRODUCTO L KM107: 389G
		XL	N.A	N.A	47 cm (+/-) 1 cm	93 cm (+/-) 1 cm94 cm	N.A	N.A	Largo de correa: 130cm (+/-) 1 cm PESO TOTAL PRODUCTO XL KM108: 408.8G
		XXL	N.A	N.A	47 cm (+/-) 1 cm	97 cm (+/-) 1 cm	N.A	N.A	Largo de correa: 131cm (+/-) 1 cm PESO TOTAL PRODUCTO XXL KM109: 418.9G
EMPAQUE:		Material		Tamaño		Peso	Calibre	Información que brinda	
		BOLSA				28,4gr	90gr	N/A	
		ETIQUETA		15 cm de ancho x 15 cm de alto		5.0gr	N/A	Nombre del producto, Uso, Instrucciones, Contraindicaciones y	
		STICKER PICKING		3.5 cm ancho x 3cm alto		0.2 g	N/A	Referencia, Lote.	
		STICKER CODIGO DE BARRAS		3.5 cm ancho x 3cm alto		0,2gr	N/A	Referencia, lote, código de barras.	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Variables como temperatura, humedad e iluminación para la buena disposición del producto y preservación del mismo		TEMPERATURA= (MAX: 30°C) + 2° C HUMEDAD RELATIVA = (MAX: 75%) + 5% A TENER EN CUENTA: 1. Evitar almacenar en ambientes cálidos"definiendo cálido a temperatura mayores entre 32° y 40 °C. 2. No deben retirarse los dispositivos medicos de su empaque primario, deben conservarse simpre en su empaque original. 3. No deben exponerse los productos al sol 4. El rótulo de cada producto deberá establecerse en el empaque primario. 5. Los dispositivos deben estar en Estado de limpieza, orden y aseo en paredes, pisos y techos de las áreas donde se realicen actividades de almacenamiento. 6. Disponer de equipos contra incendios en área de fácil acceso. 7. Realizar Limpieza y desinfección de las instalaciones y superficies de trabajo, control de roedores e insectos, para evitar la contaminación. SE DEBE CUMPLIR CON: • Cumplir con el Uso de los elementos de protección personal (EPP). Sujeta a la matriz legal vigente • Especificamente con los EPP para manipulación de cargas (Faja lumbar o arnés. Guantes de maniobra, Botas punta de acero, a su vez el personal no debe portar elementos colgantes (Tipo collares, corbatas, pulseras, relojes de pulso, anillos, aretes). Utilización de cofia para el cabello. • Garantizar en el almacenaje que los planos móviles del tendido de la cama estén debidamente asegurados. • La manipulación del producto (traslado, carga y arrume) debe realizarse entre dos personas para compensar carga, se debe maniobrar por el chasis principal rígido no por los planos, la cama debe manipularse Verticalmente plano cabeza hacia abajo, plano pies hacia arriba (Frontales respectivamente hacia arriba, hacia abajo, laterales hacia izquierda, hacia derecha)Se debe calcular la capacidad y resistencia, Tener en cuenta la resistencia estabilidad y facilidad de manipulación de embalaje. Se debe cubrir proteger el material cuando este lo requiera.							
No. REGISTRO SANITARIO: Numero de registro Invima, si aplica		INVIMA 2018 DM-0003214-R1			OBSERVACIONES: Se actualiza partida arancelaria 9021101000 Garantía aplica sobre costuras, no incluye mal uso, desgaste natural, exposición a fuentes de calor, cortes o punciones. 30 días contados a partir de la fecha de emisión de la factura, artículo que no tiene cambio ni retracto a la venta por ser dispositivo de contacto con piel, de uso personal.				
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: De ficha Técnica		3/4/2023							