

# Septalkan®

DETERGENTE DESINFECTANTE EN SPRAY

SIN ALCOHOL

Científicamente desarrollado para la limpieza y desinfección de alto nivel en dispositivos médicos invasivos y no invasivos y equipos biomédicos, que no pueden ser esterilizados o desinfectados por inmersión o métodos tradicionales, tales como unidades odontológicas, piezas de mano, autoclaves, endoscopios, ecógrafos, torres de laparoscopia, transductores, estetoscopios, glucómetros, incubadoras, equipos de laboratorio clínico, resonadores, tomógrafos y termómetros. Inicio de acción inmediato.

- La superficie estará libre de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos y esporas) en 5 minutos.

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

- Presentación en frasco de 750 mL con aspersor.

## FÓRMULA

Cloruro de didecildimetilamonio (0,25 g/kg).

Cloruro de alquilbencildimetilamonio (0,95 g/kg). (Amonios cuaternarios de cuarta y quinta generación). Sin perfume. pH: 7.

## REGISTRO SANITARIO

INVIMA No. 2015DM-0014095.

## PRECAUCIONES GENERALES

1. Utilice los productos para la limpieza y la desinfección con precaución y con los elementos de protección personal.
2. Ver hoja de seguridad en [www.alkamedica.com](http://www.alkamedica.com)

## CONSIDERACIONES DEL PRODUCTO

- Detergente desinfectante listo para usar mediante aspersión (spray).
- No contiene alcohol, por lo que no es corrosivo con el elemento a tratar, no se evapora rápidamente y no genera vapores.
- **Septalkan®** contiene agentes de limpieza altamente efectivos que funcionan en conjunto con las propiedades de la desinfección de alto nivel, por lo que elimina los microorganismos y reduce el riesgo de contaminaciones cruzadas sin ocasionar daños en los materiales y los equipos.

**MODO DE USO:** Ver al respaldo.

## SEGURIDAD



No tóxico.  
No irritante.  
No sensibilizante.  
No contiene sustancias  
alergénicas.



No corrosivo.  
No mancha.  
Sin EDTA y sin  
NTA.



Utilizar elementos  
de protección  
personal.



Producto **100% amigable con el ambiente.**  
Producto **100% biodegradable**, que no genera bioacumulación.

## PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

**Actividad Bactericida:**

EN 1276. *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae* en 5 minutos.

EN 13727. *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae* en 5 minutos.

EN 14561. *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae* en 5 minutos.

EN 13697. *Pseudomona aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hire* en 5 minutos.



NF T 72-281. *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli* en 5 minutos.

**Actividad Fungicida:**

EN 13624. *Candida albicans* en 5 minutos.

EN 1650. *Candida albicans* en 5 minutos.

EN 13697. *Candida albicans* en 5 minutos.

EN 14562. *Candida albicans* en 5 minutos.

NF T 72-281. *Candida albicans*, *Aspergillus fumigatus* en 5 minutos.

**Actividad Virucida:**

EN 14476. *Rotavirus* en 5 minutos.

EN 14476. *Norovirus* en 5 minutos.

EN 14476. *Adénovirus* en 5 minutos.

EN 14476. *Hepatitis B* en 5 minutos.

EN 14476. *Hepatitis C* en 5 minutos.

EN 14476. *VIH* en 5 minutos.

EUCAST 2011. *Morbilivirus* (ATCC CCL - 34). *Paramyxoviridae* al 0.05% en 5 minutos.

CLSI 2012. *Parvovirus* (ATCC VR - 2209). *Parvoviridae* al 0.05% en 5 minutos.

**Actividad Esporicida:**

NF T 72-281. *Bacillus subtilis* en 5 minutos.

NF T 72-281. *Clostridium difficile* en 5 minutos.

ALKAMEDICA S.A.S.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO Y ÚNICO IMPORTADOR  
PARA COLOMBIA DE ALKAPHARM FRANCIA.

**Servicio al cliente:**

Manizales: (6) 889 44 60 - (6) 889 44 57 - 301 571 1865

Bogotá: (1) 432 70 95 - 301 206 9493

Línea gratuita nacional: 01 8000 41 3707

servicioalcliente@alkamedica.com

Km 4 vía Panamericana, Parquecentro Bodega 9B


Colombia.

Síguenos en



# Septalkan®

## MODO DE USO

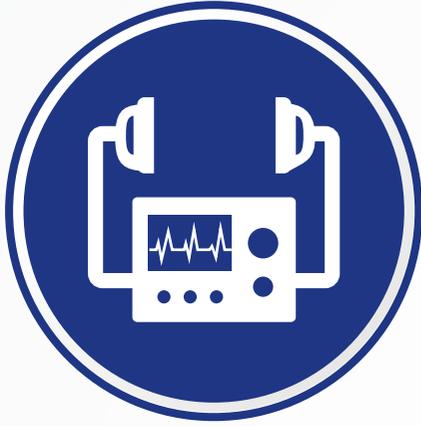

1.

Asegúrese de que la zona a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.



2.

Aplice **Septalkan®** directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.



3.

Distribuya uniformemente con un paño no tejido respetando la técnica de limpieza y deje secar.



4.

Deje actuar el producto sobre la zona donde fue aplicado durante 5 minutos.



5.

No enjuague ni retire el producto. La zona estará libre de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos y esporas).

- **Septalkan®**, detergente desinfectante listo para usar por aspersion en spray.
- Aplíquelo directamente sobre la zona a limpiar y desinfectar.
- Asegúrese de que ésta se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.
- Utilice paños o toallas no tejidas al aplicarlo y distribuirlo.